

Zahnarztpraxis Dr. Lindemann	Arbeitsanweisung OPG oder DVT Aufnahme	Datum:
Geltungsbereich	Zahnarztpraxis Dr. H.B. Lindemann	
Zuständigkeit	Dr. H.B. Lindemann	
Erarbeitet von:	Fenja Pöhl, Nadine Kistner	
Freigegeben von:		
Überprüft/geändert :		
Ziel:	Richtige durchführung der Röntgenaufnahmen	
Mitgeltende Dokumente :		


Im Zimmer

- Dampfsoft öffnen**
 - Patient eingeben**
 - auf Pat. Info gehen**
 - rechts auf parobyzzBFS**
- Fenster von byzz öffnet sich, so belassen**

Mit Patienten in den Rö-Raum gehen

- im byzz Programm Name des Pat. Aufrufen**
- links auf den reiter OPG oder DVT (bei DVT voxel
bei H.B. Erfragen)**
- oben den ersten Kreis mit Pfeil nach unten anklicken**
- dann öffnet sich ein Fenster**
- Opg das normale ist voreingestellt**
 - Inside PAN wäre das mit mehreren Schichten**
 - dort rechts auf Confirm**
- Patient am Röntgengerät einstellen**
 - bei weiblichen Pat. Ss erfragen**

- Schmuck & Prothesen entfernen
- Schürze muss nicht unbedingt, nur auf Wunsch, da Strahlung nur oberhalb
- Pat. Muss gerade stehen und Schulter locker fallen lassen
- Pat. Bitten sich an den Griffen festzuhalten
- Kinn soll auf Kinnstütze aufliegen
- Frontzähne beißen in die Aufbissplatte
- Zunge sollte am Gaumen liegen
- Nacken gerade
- die Linien kontrollieren

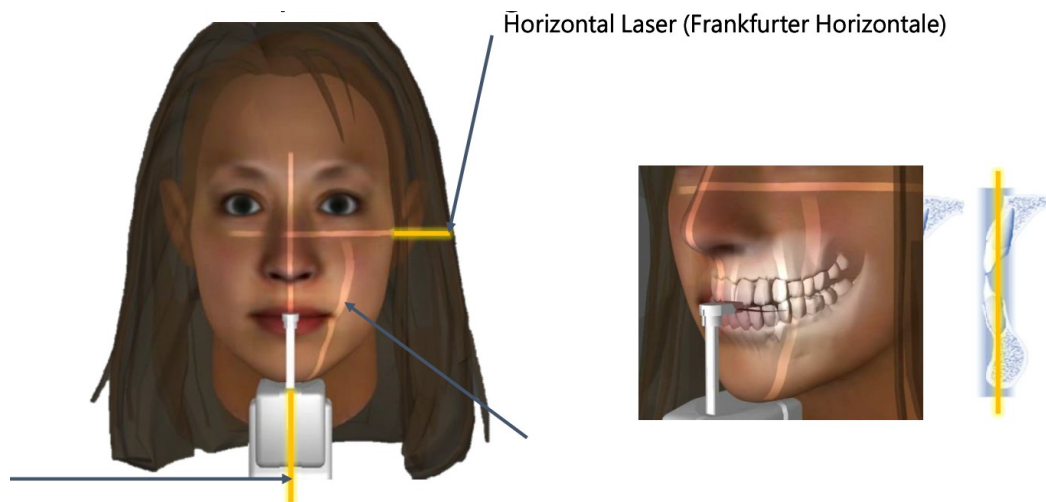

- in dem geöffneten Fenster unten rechts auf Ready